

CALENTADOR DE PARAFINA DE 4Kg



RH-034

Fundidor de parafina y parafango, inyectado en plástico con cuba de aluminio esmaltada de 4 Kg de capacidad.

Por las dimensiones de la cuba es adecuado para tratamientos tanto en miembros superiores como en inferiores.

Incorpora luz piloto con control de la temperatura de la cuba, mando interruptor regulador del termostato, y tapa transparente.

MANEJO:

Conectado a la red de corriente y depositada la parafina sólida en la cuba, con la tapa puesta, se acciona el mando interruptor-regulador llevándolo a su máximo recorrido. Una vez la parafina casi líquida ponemos el mando del termostato a la temperatura de aplicación de la parafina, y esperamos hasta que alcance esa temperatura, comprobando con un termómetro la temperatura de la parafina antes de su aplicación para evitar posibles quemaduras. La temperatura de aplicación, dependiendo de la composición de la parafina, es de alrededor de 45-50°C.

Con el mando de regulación a la temperatura de aplicación seleccionada, la resistencia, se enciende o apaga para mantener esa temperatura.

Voltaje: 220V

Consumo: 150W

Dimensiones:

38 x 26 x 18cm medidas externas del aparato
32 x 18 x 12cm de profundidad medidas de la cuba

Peso: 2.8Kg



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA